



AquaGuard®

SEGURANÇA E PROTEÇÃO DURANTE O BANHO HOSPITALAR




GUIA RÁPIDO DE USO

Para consultar as instruções completas sobre o AquaGuard®, incluindo contraindicações e precauções, acesse o site medcorpnet.com.br.

PASSO 1 ⚠ IMPORTANTE



Antes da aplicação, mantenha a pele seca e livre de óleos e hidratantes. Pode ser usado um lenço umedecido com álcool para preparar a pele para a aplicação.

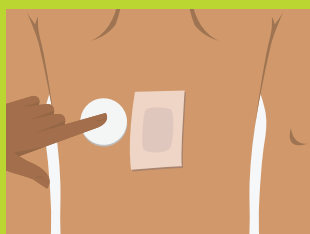


PASSO 2

Dobre uma pequena seção das tiras de papel, expondo o adesivo nos cantos. Tenha cuidado para não tocar no adesivo.



PASSO 3

Remova a tira superior e coloque o adesivo na pele acima do local desejado.

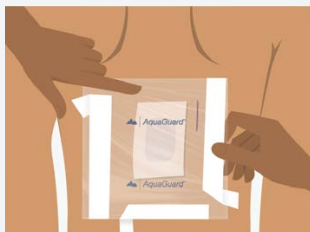

PASSO 4

Remova a tira lateral do adesivo, segure no meio e faça uma pequena dobra, como se fosse um vinco. Cole na pele e pressione levemente na lateral, para que o adesivo fique bem aderido.




Repita do outro lado.




PASSO 5

Remova a tira inferior e pressione o adesivo logo abaixo do local desejado. Se necessário, aplique uma dobra, como realizado nas laterais.

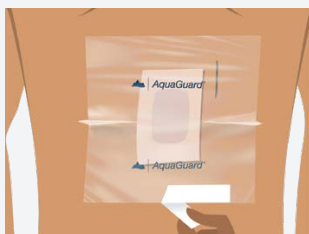

PASSO 6

Aplique pressão digital em todos os lados da folha adesiva, para garantir uma vedação completa antes do banho.

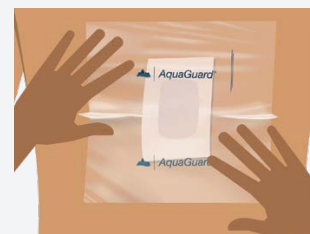

Para mais explicações de uso,
 **ASSISTA AO VÍDEO**
<https://shre.ink/aquaguard>

MEDCORP®
SAÚDE E TECNOLOGIA | DESDE 1993

