



MODO DE USO


SERINGA PREENCHIDA - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%

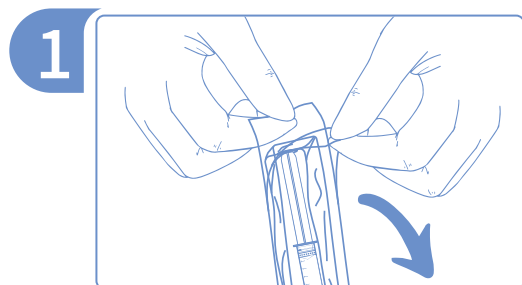


1 Abra a embalagem da seringa e retire a seringa. Verifique a clareza da solução e confirme que a tampa protetora está corretamente posicionada.

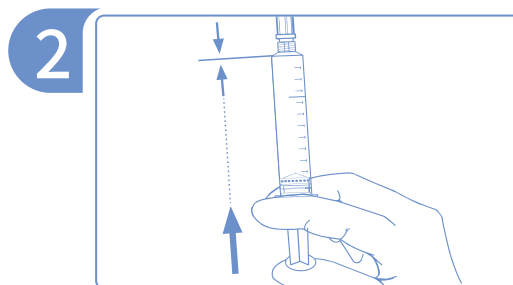


2 Empurre o êmbolo para cima para liberar o selo entre o êmbolo e o corpo da seringa antes de remover a tampa protetora.

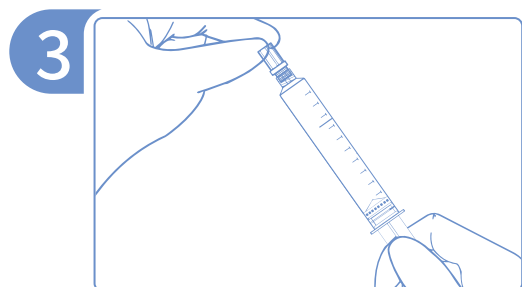

3 Remova a tampa protetora da ponta torcendo de forma asséptica.

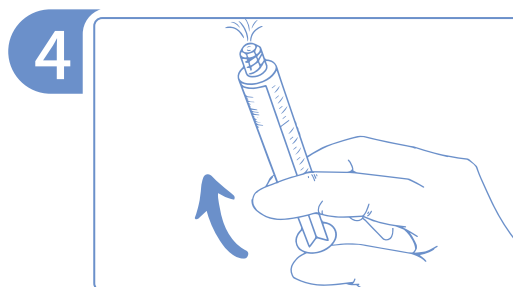

4 Empurre o êmbolo para frente para expulsar o ar da seringa.

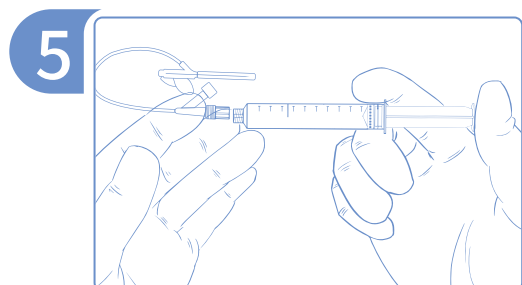

5 Conecte a seringa ao cateter de forma asséptica e empurre o êmbolo para administrar o volume necessário, segundo a política da instituição.



6 Descarte a seringa utilizada e a solução residual. Não reutilize.